

InBody370S 프린터 호환 리스트



삼성
SL-M2035



렉스마크
MS312DN



주의 특정 버전 이상 호환 가능 프린터




삼성
SL-M2027W
* 370SDM-0401 버전 이상 호환
* 무선으로 사용 가능



HP
레이저 젯 프로
M203DW
* 370SDM-0390 버전 이상 호환

InBody370S 버전 확인 방법

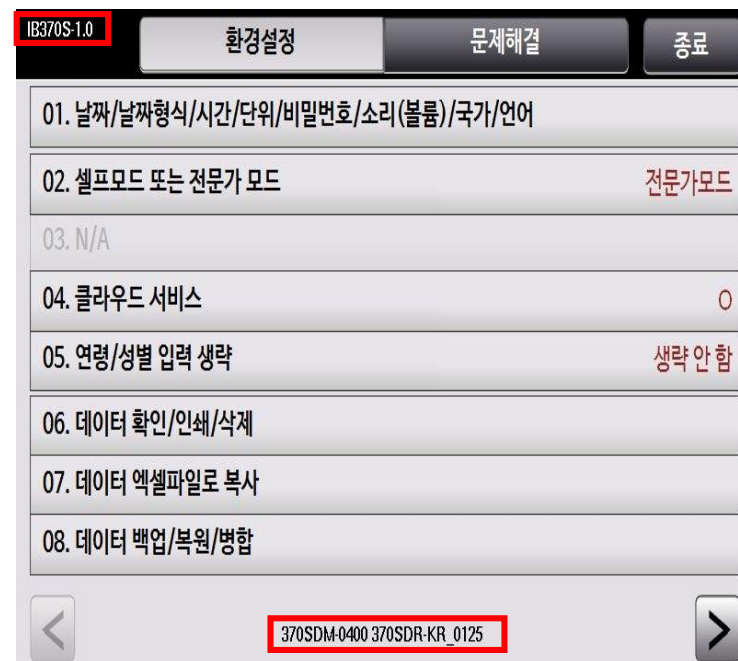

- 관리자 메뉴 진입하여 우측 상단 IB370S-1.0 문구를 5회 클릭 시 하단에 상세버전이 표기됩니다.
- 370SDM-0*** 버전 뒤 4자리가 인바디 버전입니다.
- * 결과지 출력 본 좌측 하단에서도 인바디 버전 확인이 가능합니다.

InBody370S 프린터 연결 기타 안내

- 인바디 버전 업그레이드는 방문AS로 가능합니다.
www.inbody.com 고객센터 > 1:1문의 > 문의하기 로 접수해주세요
- 소지하고 있는 프린터가 있다면 [**InBody370S 프린터 설정 방법**] 의 ③ 에서 프린터 언어를 모른다고 선택을 한 뒤 시범인쇄를 진행해주세요
정상적으로 출력되는 샘플 결과지가 있다면 해당 프린터 사용이 가능하나
정상적으로 출력되는 샘플 결과지가 없다면 해당 프린터 사용은 불가합니다.
- SL-M2027W 프린터만 무선연결 호환가능하며 0401 버전 이상에서 호환 가능합니다.
- 무선프린터는 인바디와 프린터 동일 WIFI 가 연결되어있어야 하며
프린터 WIFI 연결 방법은 프린터 제조사 통해 문의 바랍니다.
인바디 WIFI 연결 방법은 사용자 매뉴얼 참고바랍니다.



프린터 케이블 연결 단자

프린터 케이블 연결 단자



InBody370S 프린터 설정 방법



환경설정	문제해결	종료
09. 프린터 연결 SPL2009-600		
10. 인쇄할 결과지 종류		
11. 자동 인쇄 여부 및 자동 인쇄 매수 1		
12. 결과지를 인쇄할 용지 A4 용지		
13. 결과지 항목/해설 선택		
14. 인쇄되는 로고		
15. 인쇄 위치 조절		
16. 인터넷 연결 Wi-Fi (무선인터넷)		

< 1 **2** 3 4 >



09. 프린터 연결 도움말 나가기

인바디와 연결 가능한 프린터는 제한적입니다.

- 새 프린터를 구입하는 경우, 웹사이트(<http://www.inbodyservice.com>)에서 인바디가 추천하는 프린터를 확인하여 사용하세요.
- 보유하고 계신 프린터를 연결하고자 하는 경우, 아래에서 [O]를 선택하세요. 연결 가능한 프린터인지 확인하여 연결할 수 있습니다.

프린터를 연결하시겠습니까? X O

연결방식을 선택하세요.

☒ USB 케이블 SPL2009-600

☒ LAN 또는 Wi-Fi

다음

09. 프린터 연결 도움말 나가기

프린터를 연결하기 위해 먼저 아래 안내를 따르세요.

- 프린터와 인바디를 USB 케이블을 이용해 연결하세요.
- 프린터의 전원을 켜세요.
- 프린터 용지함에 빈 A4 용지를 9장 이상 넣으세요.

다음



09. 프린터 연결 도움말 나가기

프린터를 연결하려면 프린터의 통신언어를 선택해야 합니다. 연결하려는 프린터의 통신언어를 알고 계십니까?

- 인바디에서 지원하는 통신언어: PCL, SPL, SPL2009, SPL2009-600, SPL2011, EPSON 4color, EPSON 6color, PCL3GUI, PCLmS

X O



09. 프린터 연결 도움말 나가기

연결하려는 프린터의 통신언어를 선택하세요.

<input checked="" type="checkbox"/> PCL	<input checked="" type="checkbox"/> SPL	<input checked="" type="checkbox"/> SPL2009
<input checked="" type="checkbox"/> SPL2009-600	<input checked="" type="checkbox"/> SPL2011	<input checked="" type="checkbox"/> EPSON 4color
<input checked="" type="checkbox"/> EPSON 6color	<input checked="" type="checkbox"/> PCL3GUI	<input checked="" type="checkbox"/> PCLmS

시범인쇄를 통해 인쇄가 올바르게 되는지 확인하세요.

시범인쇄

① 프린터 케이블을 인바디 USB 포트에 연결

② 인바디 관리자 메뉴 > 09. 프린터 연결 클릭

③ 프린터 연결 O 클릭 > 시범인쇄 클릭

④ 정상적으로 출력되는 결과지 샘플의 우측 상단 프린터 통신언어를 인바디에서 선택

