


## [목차]

1. [LB2.0 데이터 백업 가이드](#)
2. [LB2.0 HardLock \(하드락\) 드라이버 설치](#)  
: (운영체제 Window XP 이하에서만 사용가능)
3. [LB2.0 프로그램 다운로드 가이드](#)
4. [LB2.0 설치가이드](#)
5. [LB2.0 데이터 복원 가이드](#)

참고: 링크를 따라가시려면 <Ctrl>을 누른 채 마우스 오른쪽 버튼을 클릭해주세요

# [LB2.0 데이터 백업 가이드]

## 1) C:\ProgramFiles\Biospace\Lookin'Body2.0\Database\masterDB.MDB

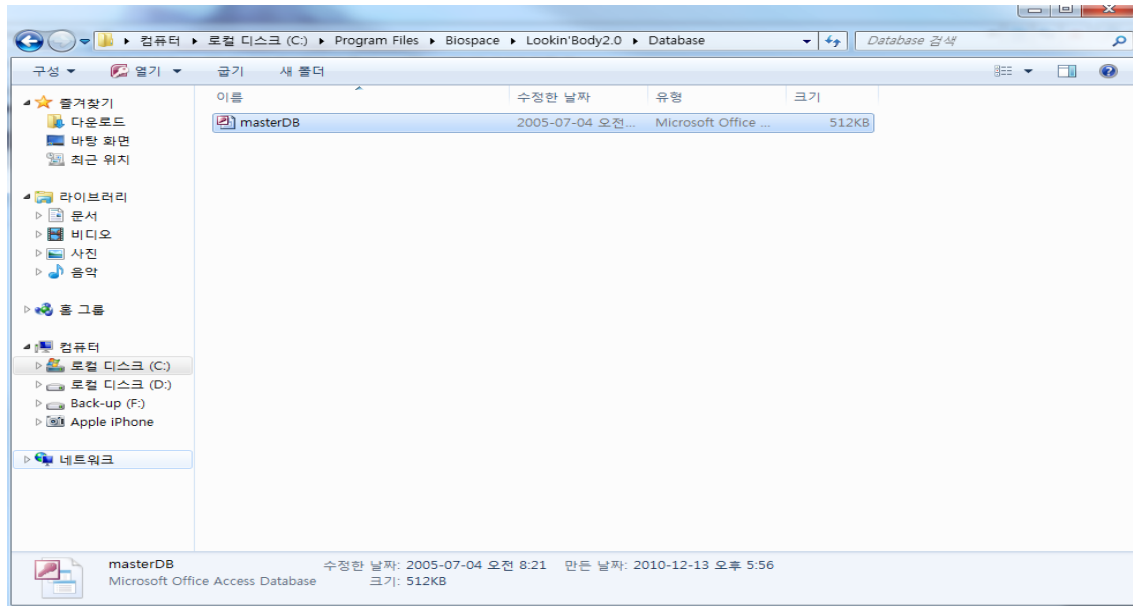

C:\ProgramFiles\Biospace\Lookin'Body2.0\Database

경로에서 **masterDB.MDB** 복사하여(Ctrl+C)

Data 를 백업할 경로에 붙여 넣기(Ctrl+V)

# [LB2.0 HardLock (하드락) 드라이버 설치]

## 1) HardLock (하드락) 준비



## 2) HardLock (하드락)을 컴퓨터 USB 포트에 꽂기

## 3) 제품자료실-LookinBody 로 이동

**BIOSPACE** HOME ENGLISH JOIN LOGIN SITEMAP LOOKIN' BODY INBODY MALL

▶ 제품자료실 ▶ HOME > 고객센터 > 제품자료실

(주)바이오스페이스 제품사용의 활용도를 높이고, 고객님들의 만족도를 높이기 위한 **제품자료실**입니다.  
지속적인 업그레이드 제공으로 제품의 활용도와 만족도를 높일 수 있도록 항상 노력하겠습니다.

사용자 메뉴얼	Lookin' Body	프린터 호환리스트
제품명	작성일	최종 업데이트일
Lookin'Body510 PAPS 학교용 설치 파일	2011-04-12	2011-05-31
Lookin'Body FINA 설치 파일	2011-02-07	2011-02-07
Lookin'Body3.0 설치 및 업데이트 파일	2010-12-08	2011-05-04
Lookin'Body730(HD) 설치 및 업데이트 파일	2010-12-08	2011-05-04
학교용 자세평가 카메라 드라이버	2010-09-08	2010-09-08
Lookin'Body110 설치 파일	2010-09-06	2011-05-12
Lookin'Body u-Town 설치 및 업데이트 파일	2008-08-12	2011-05-04
Lookin'Body Sports 업데이트 파일	2007-07-27	2011-01-12
InBody Check2 설치 및 업데이트 파일(홈헬스케어용)	2006-11-20	2011-05-25
DotNet Framework1.1	2005-05-18	2010-12-13
<b>Lookin'Body2.0 설치 및 업데이트 파일(Win xp만 사용 가능)</b>	2005-05-18	2011-03-15
Lookin'Body1.0 설치 및 업데이트 파일(Win xp만 사용 가능)	2005-05-18	2011-05-25

(3-1) Lookin' Body

(3-2) Lookin'Body2.0 설치 및 업데이트 파일(Win xp만 사용 가능)

#### 4) Hard Lock(하드락) Driver 설치 파일 컴퓨터 저장

HOME ENGLISH JOIN LOGIN SITEMAP LOOKIN' BODY INBODY MALL

▶ 제품자료실
▶ HOME > 고객센터 > 제품자료실

(주)바이오스페이스 제품사용의 활용도를 높이고, 고객님들의 만족도를 높이기 위한 **제품자료실**입니다.  
 지속적인 업그레이드 제공으로 제품의 활용도와 만족도를 높일 수 있도록 항상 노력하겠습니다.

사용자 메뉴얼
**Lookin' Body**
프린터 호환리스트

제목 Lookin'Body2.0 설치 및 업데이트 파일(Win xp만 사용 가능)
2011-03-15

다운로드
LB20.zip

다운로드
LBUPDATE.exe

다운로드
LB2.0 설치 메뉴얼.doc

다운로드
**HASPUserSetup.exe**

Lookin'Body2.0 하드락을 사용하시는 고객분만 다운로드 후 설치 하시기 바랍니다.

설치후 프로그램 실행에 문제가 있는경우 제품 자료실의 DotNet Framework 를 추가 설치 하시기 바랍니다.

주의)컴퓨터가 인터넷에 연결되는 상태이고 Windows98, Explorer6.0, DotNetFrameWork1.1이상의 환경에서만 정상적으로 사용할수 있습니다.

Explorer6.0은 윈도우 업데이트를 통해 설치가 가능하며, DotNetFrameWork1.1은 제품 자료실에서 다운로드 하실 수 있습니다.

LB20.zip 은 설치 파일입니다

HASPUserSetup.exe 은 하드락 드라이버입니다.

#### 5) 드라이버 설치 진행

컴퓨터 > 로컬 디스크 (D:) > 설치프로그램 > Lookin'Body > LB20
LB20 검색

이름	수정된 날짜	유형	크기
LB20	2010-12-13 오후...	파일 폴더	
<b>HASPUserSetup</b>	2010-12-13 오후...	응용 프로그램	2,428KB
LB20	2010-12-13 오후...	행집 ZIP 파일	154,686KB
LB20_Serial	2010-01-28 오전...	텍스트 문서	1KB

Select Language

Please select the language that you would like to use during the installation.

U.S. English

Deutsch


OK

Cancel

HASPUserSetup


수정된 날짜: 2010-12-13 오후 5:49    만든 날짜: 2010-12-13 오후 5:48

응용 프로그램    크기: 2.37MB

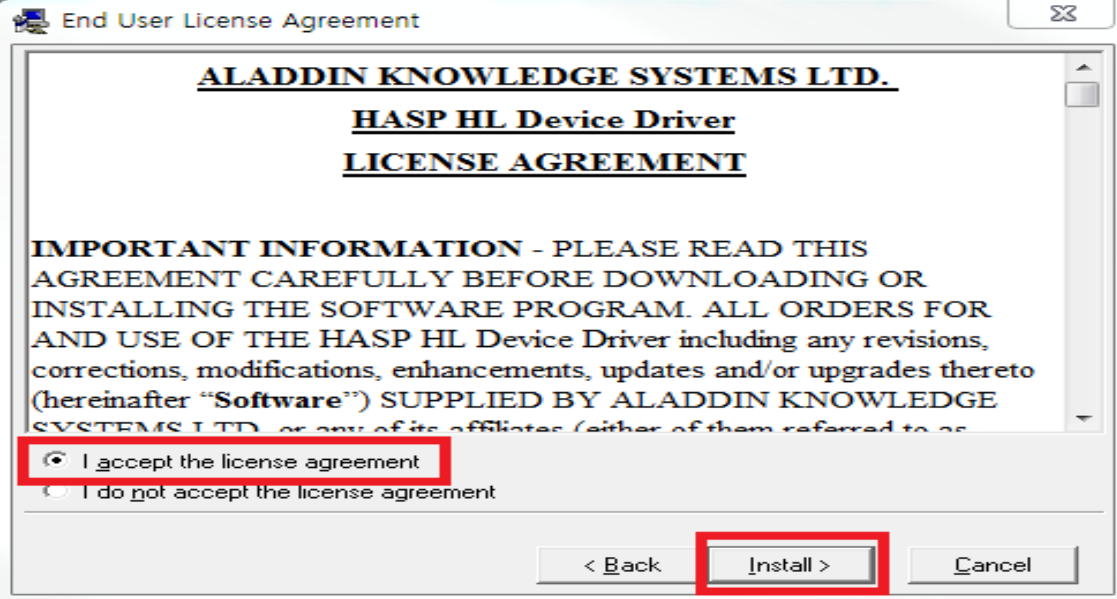

## [LB2.0 프로그램 다운로드 가이드]

- 1) <http://www.biospace.co.kr>
- 2) 홈페이지 좌측 고객센터 -> 6. 제품자료실

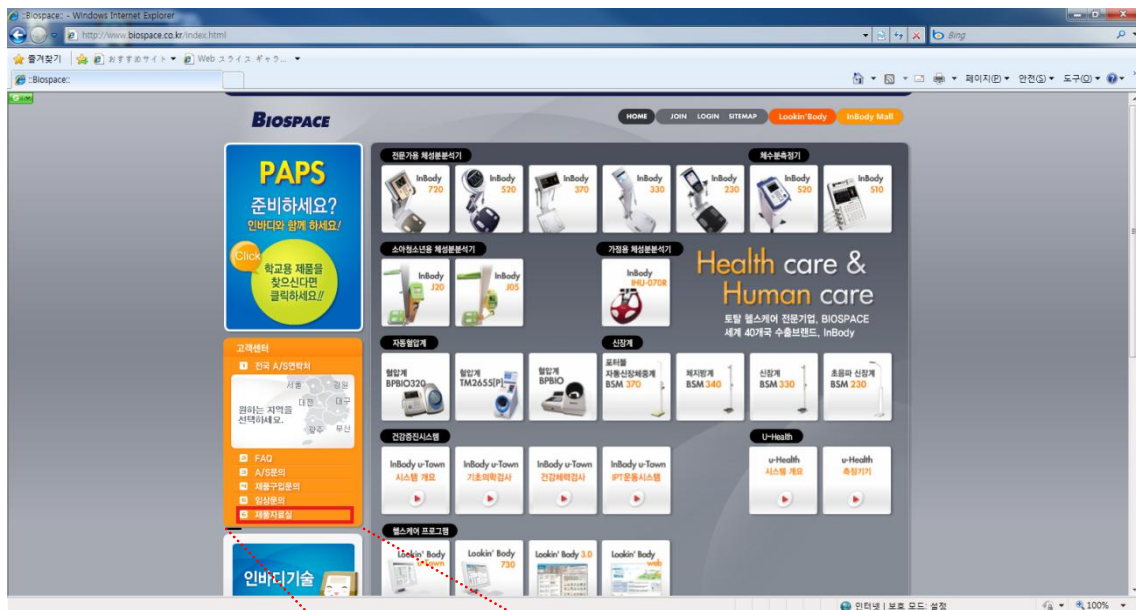

### 3) 제품자료실-LookinBody 로 이동

**BIOSPACE** HOME ENGLISH JOIN LOGIN SITEMAP **LOOKIN' BODY** INBODY MALL

▶ 제품자료실

▶ HOME > 고객센터 > 제품자료실

(주)바이오스페이스 제품사용의 활용도를 높이고, 고객님들의 만족도를 높이기 위한 **제품자료실**입니다.  
지속적인 업그레이드 제공으로 제품의 활용도와 만족도를 높일 수 있도록 항상 노력하겠습니다.

사용자 메뉴얼 **Lookin' Body** 프린터 호환리스트

제품명	작성일	최종 업데이트일
Lookin'Body510 PAPS 학교용 설치 파일	2011-04-12	2011-05-31
Lookin'Body FINA 설치 파일	2011-02-07	2011-02-07
Lookin'Body3.0 설치 및 업데이트 파일	2010-12-08	2011-05-04
Lookin'Body730(HD) 설치 및 업데이트 파일	2010-12-08	2011-05-04
학교용 자세평가 카메라 드라이버	2010-09-08	2010-09-08
Lookin'Body110 설치 파일	2010-09-06	2011-05-12
Lookin'Body u-Town 설치 및 업데이트 파일	2008-03-12	2011-05-04
Lookin'Body Sports 업데이트 파일	2007-07-27	2011-01-12
InBody Check2 설치 및 업데이트 파일(홈헬스케어용)	2006-11-30	2011-05-25
DotNet Framework1.1	2005-05-18	2010-12-13
<b>Lookin'Body2.0 설치 및 업데이트 파일(Win xp만 사용 가능)</b>	2005-05-18	2011-03-15
Lookin'Body1.0 설치 및 업데이트 파일(Win xp만 사용 가능)	2005-05-18	2011-05-25

1

(3-1) **Lookin' Body**

(3-2) **Lookin'Body2.0 설치 및 업데이트 파일(Win xp만 사용 가능)**

### 4) LookinBody2.0 설치 파일 컴퓨터 저장

## ▶ 제품자료실

&gt; HOME &gt; 고객센터 &gt; 제품자료실

(주)바이오스페이스 제품사용의 활용도를 높이고, 고객님들의 만족도를 높이기 위한 **제품자료실**입니다.  
지속적인 업그레이드 제공으로 제품의 활용도와 만족도를 높일 수 있도록 항상 노력하겠습니다.

사용자 매뉴얼

Lookin' Body

프린터 호환리스트

제목 Lookin'Body2.0 설치 및 업데이트 파일(Win xp만 사용 가능)

2011-03-15



다운로드

LB20.zip



다운로드

LBUPDATE.exe



다운로드

LB2.0 설치 매뉴얼.doc



다운로드

HASPUserSetup.exe

Lookin'Body2.0 하드웨어를 사용하시는 고객분만 다운로드 후 설치 하시기 바랍니다.

설치후 프로그램 실행에 문제가 있는경우 제품 자료실의 DotNet Framework 를 추가 설치 하시기 바랍니다.

주의)컴퓨터가 인터넷에 연결되는 상태이고 Windows98, Explorer6.0, DotNetFrameWork1.1이상의 환경에서만 정상적으로 이용하실 수 있습니다.

Explorer6.0은 윈도우 업데이트를 통해 설치가 가능하며, DotNetFrameWork1.1은 제품 자료실에서 다운로드 하실 수 있습니다.


LB20.zip 은 설치 파일입니다


HASPUserSetup.exe 은 하드웨어 드라이버입니다.



# [LB2.0 설치가이드]


## 1) 프로그램 설치


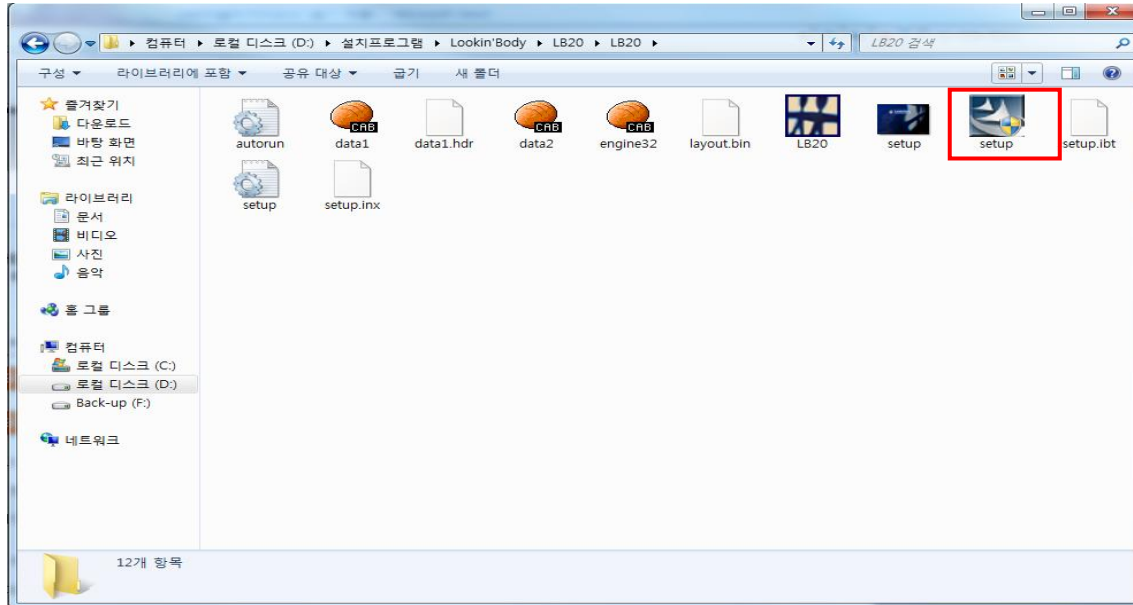




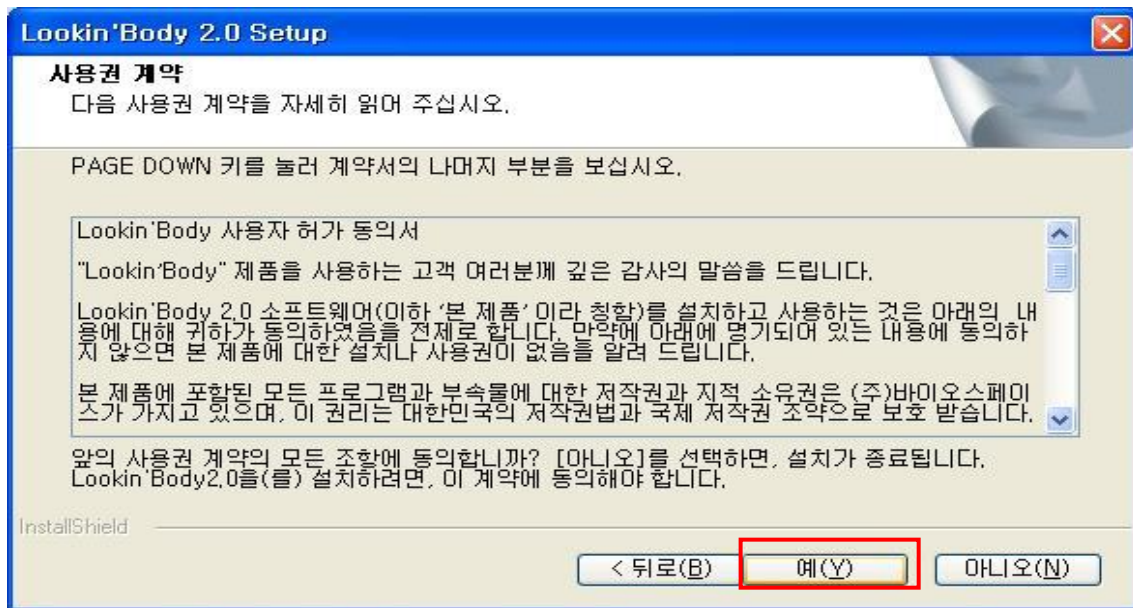


## 2) CD-Key 입력

CD 에 부착되어 있는 CD-Key 동일하게 입력 (EX: ABCDEFGH-IJKLMNOP)

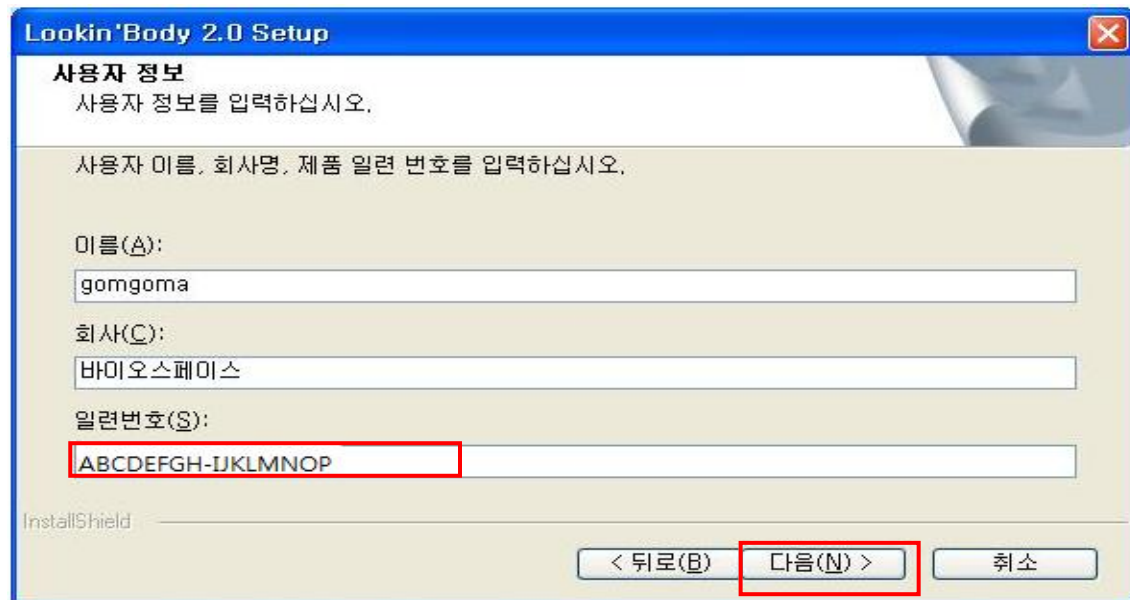

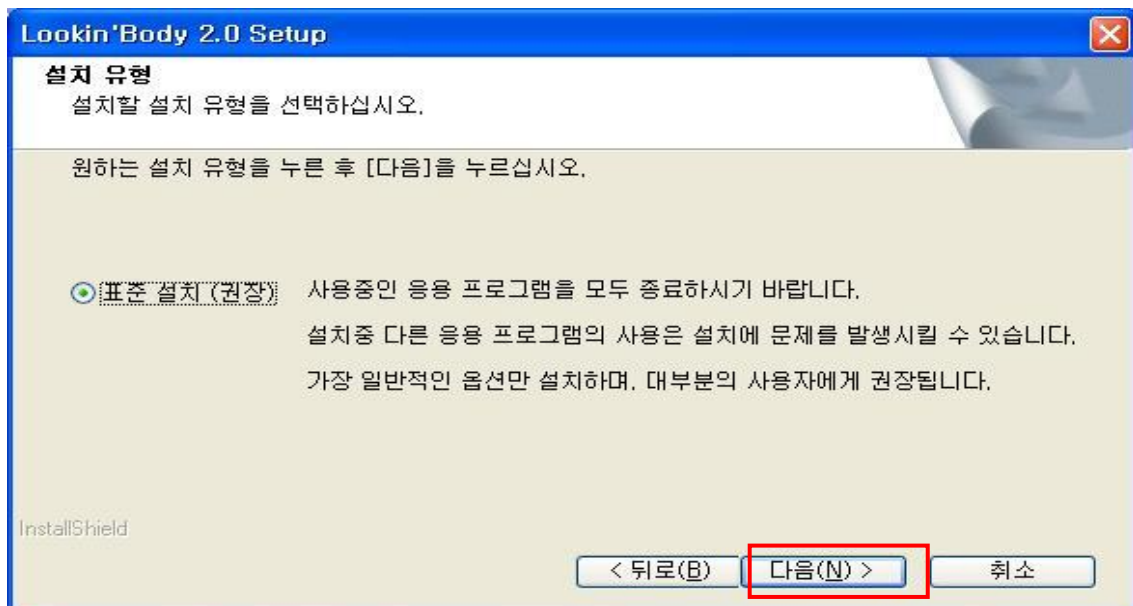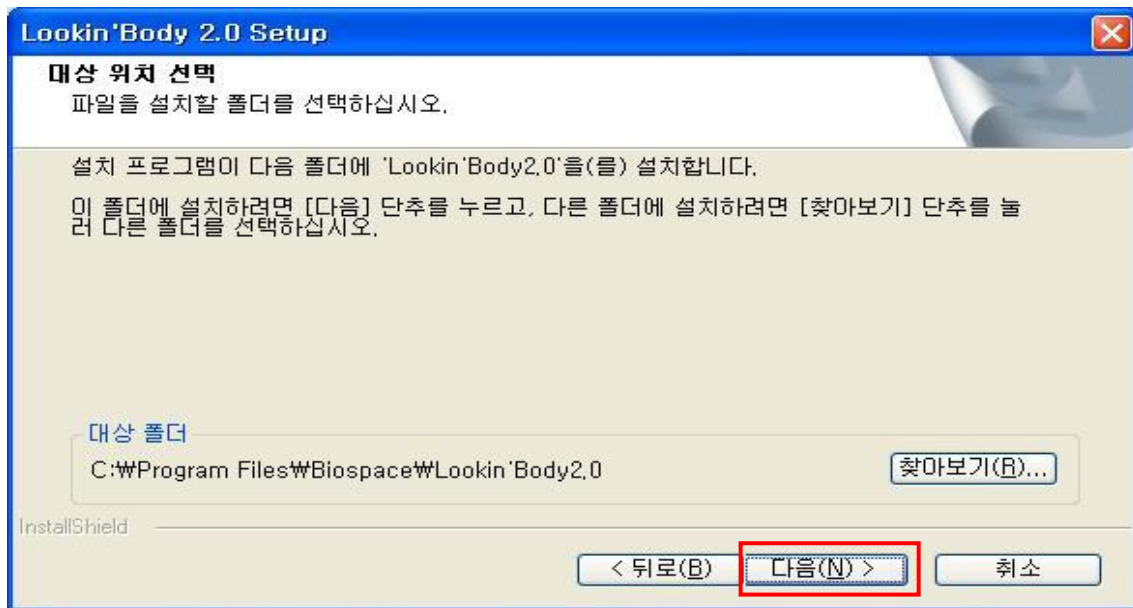

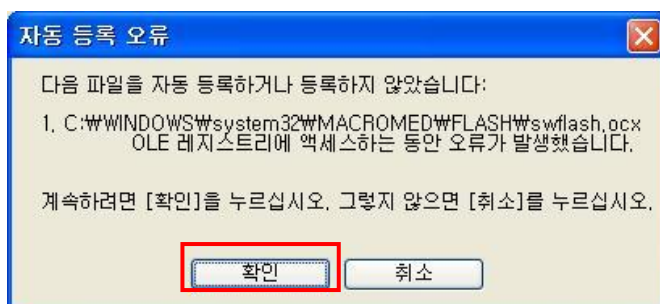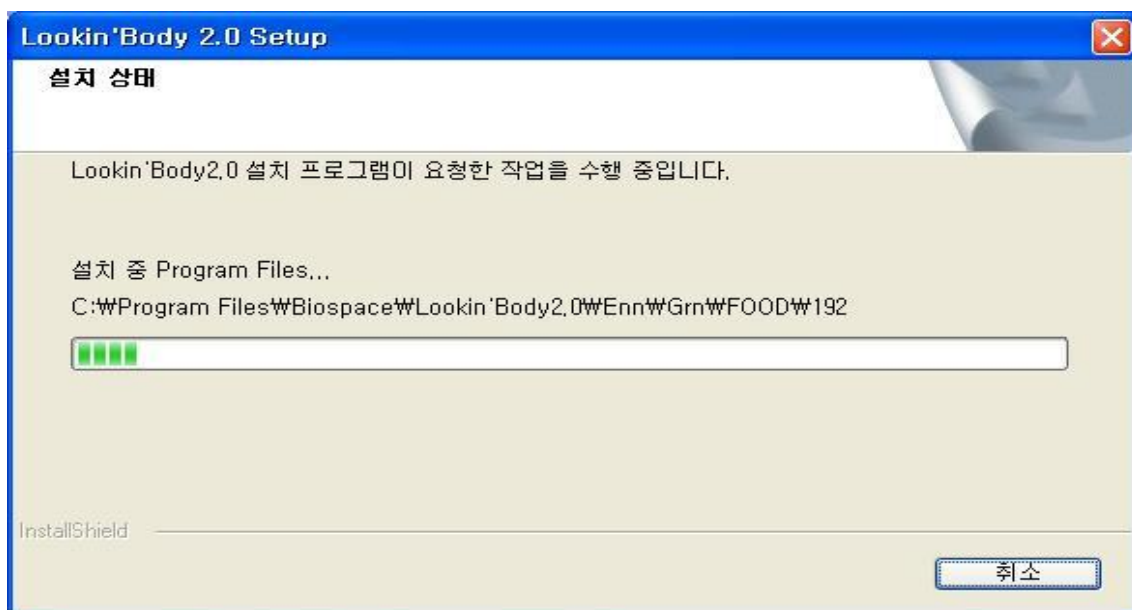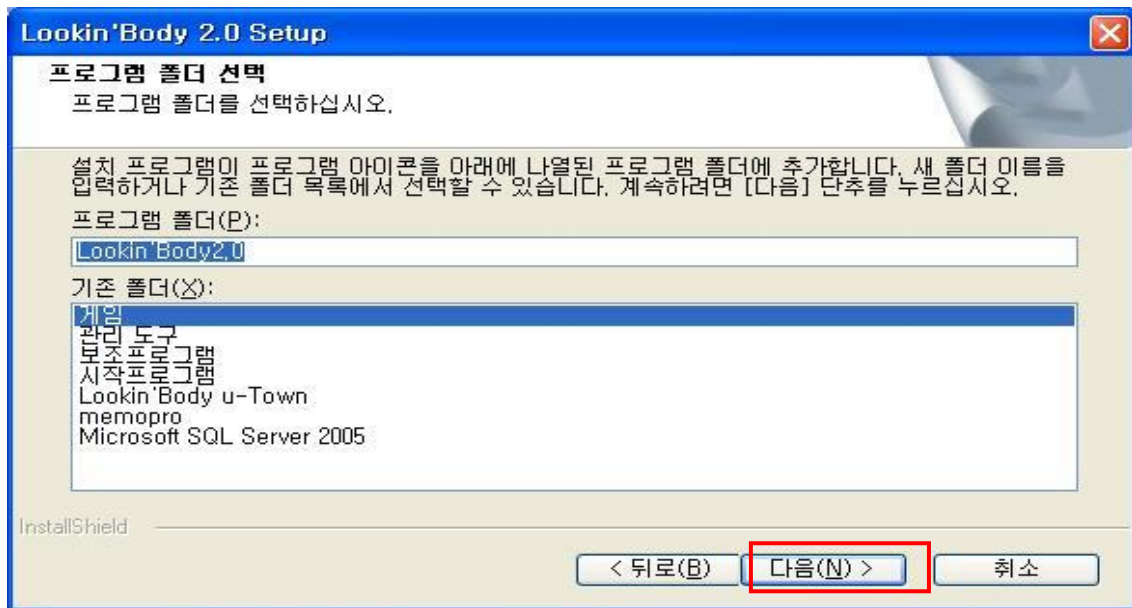

참고: LookinBody2.0 이 설치 되는 PC 에 FLASH 프로그램이 설치가 안되, 발생하는 메시지니  
관여치 마시고 설치 진행해주세요.

Lookin'Body2.0 Update Program - InstallShield Wizard



**설치 준비**

InstallShield 마법사가 설치를 준비하는 동안 기다리십시오.

Lookin'Body2.0 Update Program 설치 프로그램은 InstallShield 마법사를 준비 중이며, 사용자를 설치 프로세스로 안내합니다. 기다리십시오.




InstallShield

취소

# [LB2.0 데이터 복원 가이드]

## 1) C:\ProgramFiles\Biospace\Lookin'Body2.0\Database\masterDB.MDB

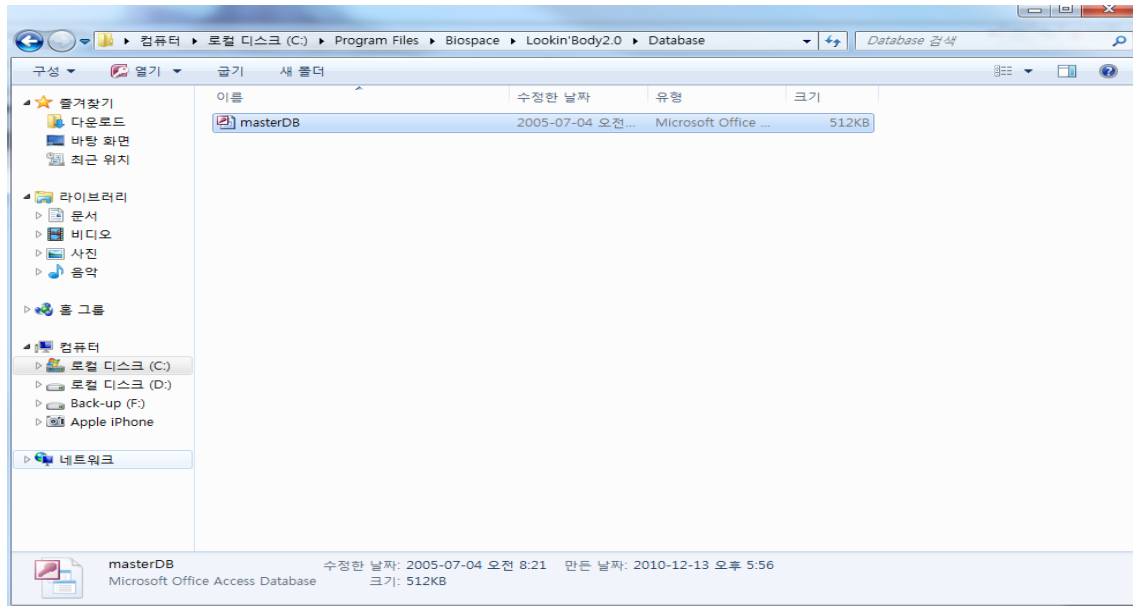

백업한 masterDB.MDB

₩Lookin'Body2.0₩Database 경로에 붙여 넣기(Ctrl+V)

복사하여(Ctrl+C)

C:\ProgramFiles\Biospace