
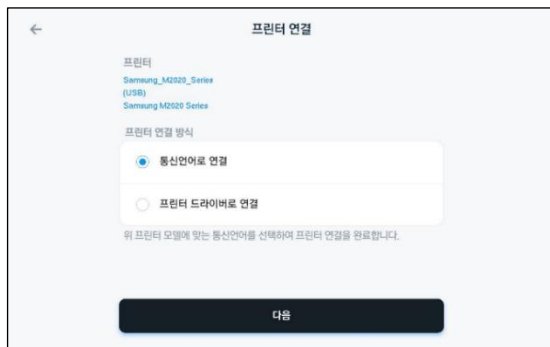


인바디580 프린터 연결 방법

1. 프린터호환리스트

***프린터를 먼저 장비와 연결해주세요**

관리자모드 > 5. 프린터 및 인쇄 설정 > 프린터 연결 선택 > 사용안함에서 사용중으로 선택 > 프린터 찾기 선택 > 연결된 장비의 모델과 같은 모델명 확인 후 선택 > 확인되지 않을 경우 원하는 프린터가 없습니다 선택 > 통신언어 또는 프린터드라이버로 연결 시도

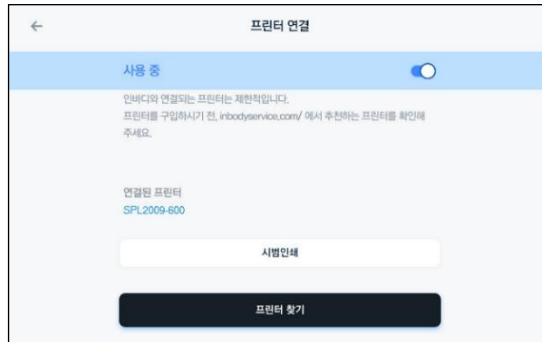

***지원프린터 Laser/Inkjet 프린터 (PCL3 이상 SPL)**

2. 무선프린터 연결

인바디 장비와 프린터에 동일한 와이파이를 연결해야 한다. 프린터에 와이파이를 연결하는 방법을 프린터 제조사의 User manual을 참고한다.

[참고] Wi-Fi 연동 시 확인해야 하는 사항.

- 1) 공유기와 제품 간의 거리가 멀어질수록 인터넷 신호가 약해지므로 제품은 공유기와 가까이 설치되어야 한다.
- 2) 공유기와 제품 사이에 장애물이 있을 경우 신호를 약하게 만드는 요인이 되므로 장애물이 없도록 한다.
- 3) 와이파이명이 영문 이외에 다른 언어를 사용한 경우 식별할 수 없다. (한글,일본어,중국어,스페인어 등 영어를 제외한 언어 모두 불가.)
- 4) 와이파이명에 () 가 포함되어 있는 경우 InBody 장비에서 프린터를 식별하지 못한다. (, _ 는 정상 연결 가능)
- 5) 2.4Ghz 대역 WIFI 사용을 권장한다. 이전 인바디의 경우 2.4Ghz 만 지원하는 경우가 많고 대부분의 WIFI 프린터는 2.4Ghz 만 지원한다.
- 6) 접근 지점(AP)에 여러 대의 무선 장치가 연결된 경우 인터넷 품질이 저하될 수 있다. 휴대폰, 무선 전화기, 전자레인지 등 기타 장치의 간섭이 있는 경우에도 발생할 수 있다.

*와이파이 명칭 중 일부 인식을 못하는 경우가 있어 @ (골뱅이), 띄어쓰기, 콤마(,), 괄호 () 사용 지양합니다.

*장비 설정 방법

-관리자모드 > 3. 연결 > 인터넷 선택 > 사용안함에서 사용중으로 선택 > WI-FI 선택 > 내부 와이파이 선택

-관리자모드 > 5. 프린터 및 인쇄 설정 > 프린터 연결 선택 > 사용안함에서 사용중으로 선택 > 프린터 찾기 선택

* InBody 장비에 와이파이를 연결한다. InBody에 연결하는 와이파이와 프린터에 연결하는 와이파이는 동일한 와이파이를 연결해야 한다.

