



InBody430 프린터 호환리스트

InBody430 Version을 확인해야 합니다.

1. Version 확인하는 방법
 - A. 장비에서 Setup 버튼 누름.
 - B. 4. Others 로 이동

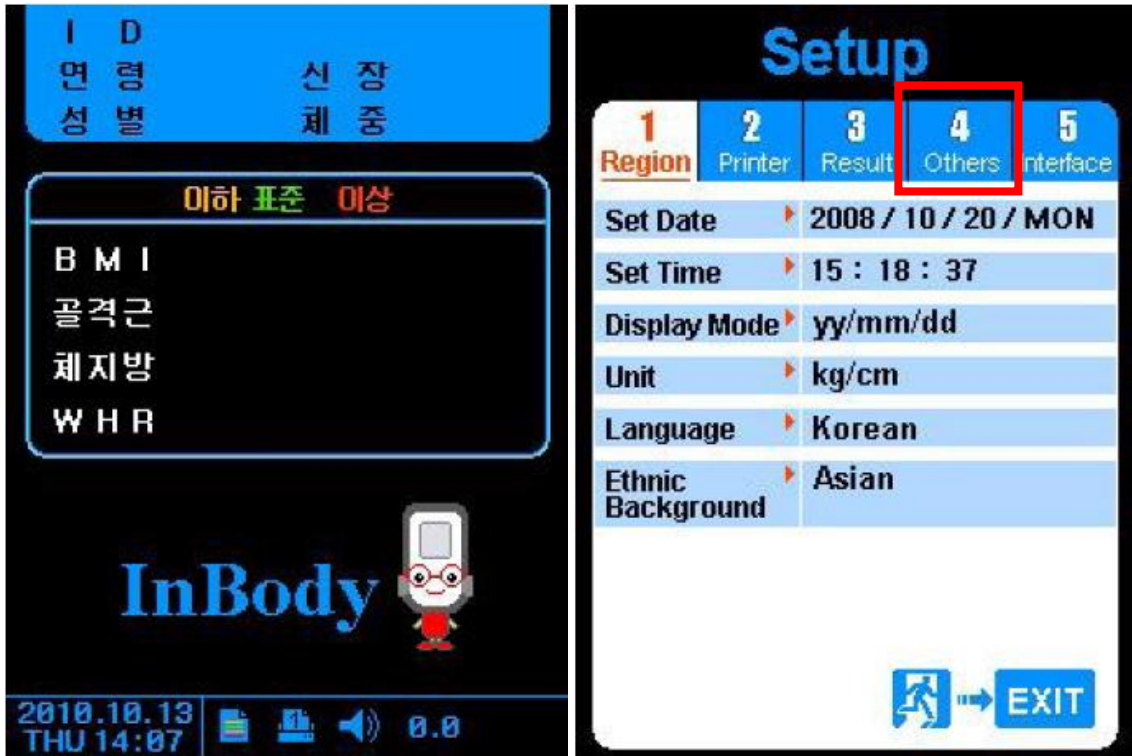

- C. Version 으로 이동 후 Setup 과 Enter 을 순차적으로 누름.
 - D. Version 을 확인 : 430DM-XX-XX 또는 430DMCXXXX

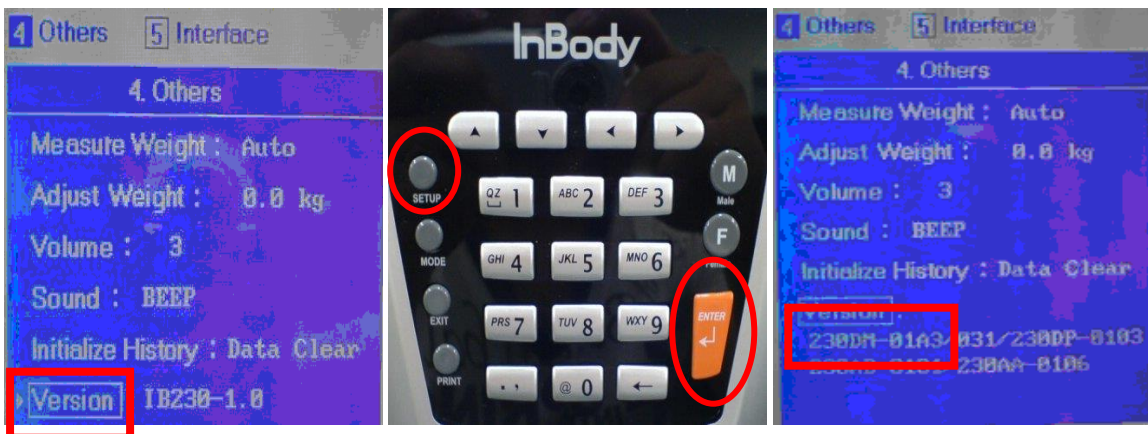

2. Version 별 프린터 호환리스트

링크를 따라가려면 Ctrl 를 누른채 클릭하세요.

- A. [430DM-0101 ~ 430DM-0108 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- B. [430DM-0109 ~ 430DM-0302 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- C. [430DM-K104 ~ 430DM-K105 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- D. [430DM-K106 ~ 430DM-K107 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- E. [430DMC2101 ~ 430DMC2104 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- F. [430DMC2105 ~ 430DMC2302 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- G. [430DMC2303 이후 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)

3. 430DM-0101 ~ 430DM-0108 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	USB	
Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	USB	
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3	USB	단종
	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-2570		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-2571N		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1610		SPL	USB	단종
	ML-1631K		SPL	USB	단종
	ML-1640K		SPL	USB	단종
	ML-1641K		SPL	USB	단종
	ML-1642K		SPL	USB	단종
	ML-2510		SPL	USB/Parallel	단종
	ML-2851DK		SPL/PCL6	USB	단종
	ML-2010		SPL	USB	단종
	ML-2240K		SPL	USB	단종
	ML-2241K		SPL	USB	단종
Lexmark	E120	Laser	PCL5e/PCL6	USB	단종
	E120n		PCL5e/PCL6	USB	단종
	E260D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	단종
	MS310D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	MS312DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

4. 430DM-0109 ~ 430DM-0302 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	USB	
Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	USB	
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3	USB	단종
	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-2570		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-2571N		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1610		SPL	USB	단종
	ML-1631K		SPL	USB	단종
	ML-1640K		SPL	USB	단종
	ML-1641K		SPL	USB	단종
	ML-1642K		SPL	USB	단종
	ML-2510		SPL	USB/Parallel	단종
	ML-2851DK		SPL/PCL6	USB	단종
	ML-2010		SPL	USB	단종
	ML-2240K		SPL	USB	단종
	ML-2241K		SPL	USB	단종
	ML-1660K/ML-1665K		SPL	USB	단종 SPL2009
	ML-1910K		SPL	USB	단종 SPL2009
	ML-1916K		SPL	USB	단종 SPL2009
	ML-2525K		SPL	USB	단종 SPL2009
	ML-2580NK		SPL, PCL5e/PCL6	USB	단종 SPL2009
Lexmark	E120	Laser	PCL5e/PCL6	USB	단종
	E120n		PCL5e/PCL6	USB	단종
	E260D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	단종
	MS310D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	MS312DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

5. 430DM-K104 ~ 430DM-K105 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	USB	
Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	USB	
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3	USB	단종
	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-2570		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-2571N		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1610		SPL	USB	단종
	ML-1631K		SPL	USB	단종
	ML-1640K		SPL	USB	단종
	ML-1641K		SPL	USB	단종
	ML-1642K		SPL	USB	단종
	ML-2510		SPL	USB/Parallel	단종
	ML-2851DK		SPL/PCL6	USB	단종
	ML-2010		SPL	USB	단종
	ML-2240K		SPL	USB	단종
	ML-2241K		SPL	USB	단종
Lexmark	E120	Laser	PCL5e/PCL6	USB	단종
	E120n		PCL5e/PCL6	USB	단종
	E260D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	단종
	MS310D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	MS312DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

6. 430DM-K106 ~ 430DM-K107 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	USB	

Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	USB	
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3	USB	단종
	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-2570		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-2571N		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1610		SPL	USB	단종
	ML-1631K		SPL	USB	단종
	ML-1640K		SPL	USB	단종
	ML-1641K		SPL	USB	단종
	ML-1642K		SPL	USB	단종
	ML-2510		SPL	USB/Parallel	단종
	ML-2851DK		SPL/PCL6	USB	단종
	ML-2010		SPL	USB	단종
	ML-2240K		SPL	USB	단종
	ML-2241K		SPL	USB	단종
	ML-1660K/ML-1665K		SPL	USB	단종
	ML-1910K		SPL	USB	단종
	ML-1916K		SPL	USB	단종
	ML-2525K		SPL	USB	단종
	ML-2580NK		SPL, PCL5e/PCL6	USB	단종
Lexmark	E120	Laser	PCL5e/PCL6	USB	단종
	E120n		PCL5e/PCL6	USB	단종
	E260D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	단종
	MS310D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	MS312DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

7. 430DMC1201 ~ 430DMC2104 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	USB	
Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	USB	

삼성	MJC-8700	Ink	PCL3	USB	단종
	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-2570		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-2571N		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1610		SPL	USB	단종
	ML-1631K		SPL	USB	단종
	ML-1640K		SPL	USB	단종
	ML-1641K		SPL	USB	단종
	ML-1642K		SPL	USB	단종
	ML-2510		SPL	USB/Parallel	단종
	ML-2851DK		SPL/PCL6	USB	단종
	ML-2010		SPL	USB	단종
	ML-2240K		SPL	USB	단종
	ML-2241K		SPL	USB	단종
Lexmark	E120	Laser	PCL5e/PCL6	USB	단종
	E120n		PCL5e/PCL6	USB	단종
	E260D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	단종
	MS310D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	MS312DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

8. 430DMC2105 ~ 430DMC2302 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	USB	
Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	USB	
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3	USB	단종
	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-2570		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-2571N		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1610		SPL	USB	단종
	ML-1631K		SPL	USB	단종
	ML-1640K		SPL	USB	단종
	ML-1641K		SPL	USB	단종
	ML-1642K		SPL	USB	단종
	ML-2510		SPL	USB/Parallel	단종
	ML-2851DK		SPL/PCL6	USB	단종
	ML-2010		SPL	USB	단종

	ML-2240K		SPL	USB	단종
	ML-2241K		SPL	USB	단종
	ML-1660K/ML-1665K		SPL	USB	단종 SPL2009
	ML-1910K		SPL	USB	단종 SPL2009
	ML-1916K		SPL	USB	단종 SPL2009
	ML-2525K		SPL	USB	단종 SPL2009
	ML-2580NK		SPL, PCL5e/PCL6	USB	단종 SPL2009
	ML-1865WK		SPL2009, PCL	USB	단종
Lexmark	E120	Laser	PCL5e/PCL6	USB	단종
	E120n		PCL5e/PCL6	USB	단종
	E260D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	단종
	MS310D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	MS312DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

9. [430DMC2303 이후 Version 의 프린터 호환리스트](#)

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고	
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	USB		
Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	USB		
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3	USB	단종	
	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종	
	ML-2570		PCL6	USB/Parallel	단종	
	ML-2571N		PCL6	USB/Parallel	단종	
	ML-1610		SPL	USB	단종	
	ML-1631K		SPL	USB	단종	
	ML-1640K		SPL	USB	단종	
	ML-1641K		SPL	USB	단종	
	ML-1642K		SPL	USB	단종	
	ML-2510		SPL	USB/Parallel	단종	
	ML-2851DK		SPL/PCL6	USB	단종	
	ML-2010		SPL	USB	단종	
	ML-2240K		SPL	USB	단종	
	ML-2241K		SPL	USB	단종	
	ML-1660K/ML-1665K		SPL	USB	단종	SPL2009
	ML-1910K		SPL	USB	단종	SPL2009
	ML-1916K		SPL	USB	단종	SPL2009
	ML-2525K		SPL	USB	단종	SPL2009
	ML-2580NK		SPL, PCL5e/PCL6	USB	단종	SPL2009
	ML-1865WK		SPL2009, PCL	USB	단종	SPL2009-600
	ML-2165W /ML-2168W		SPL2009-600	USB		SPL2009-600
	ML-2540		SPL2009-600	USB		SPL2009-600
	SL-M2620/SL-M2620ND		SPL2009-600	USB		SPL2009-600
	ML-2165		SPL2009-600	USB		SPL2009-600
	ML-2164		SPL2009-600	USB		SPL2009-600
	SL-M2028		SPL2009-600	USB	단종	SPL2009-600
	SL-M2029		SPL2009-600	USB		SPL2009-

						600
Lexmark	E120	Laser	PCL5e/PCL6	USB	단종	
	E120n		PCL5e/PCL6	USB	단종	
	E260D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel		
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	단종	
	MS310D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel		
	MS312DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel		

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.